



Einlegehinweise- Viscoject Bio

Monofokale LENTIS® mit Schlaufenhaptik

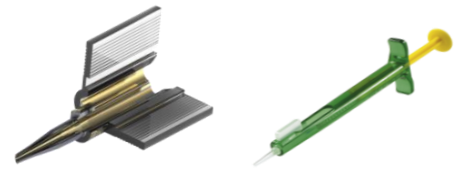


L-302-1
L-312
LS-312Y

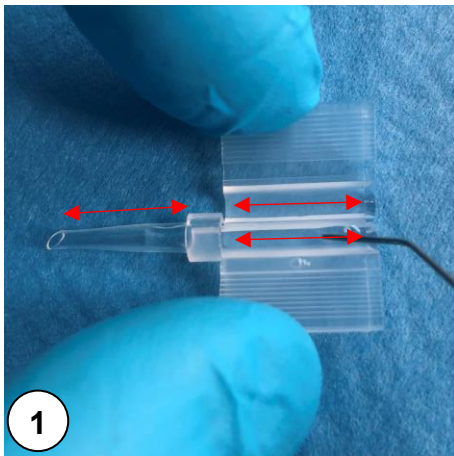

1

Kartuschenspitze und Ladekammer mit Viskoelastikum befüllen.

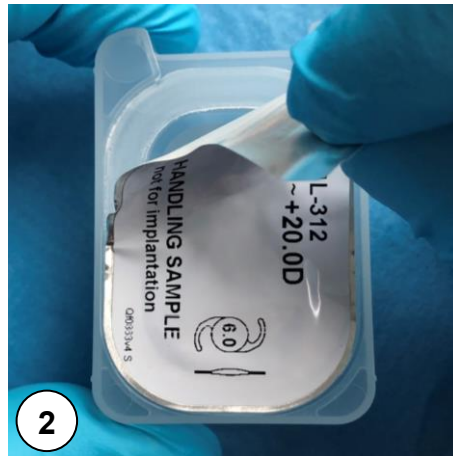


2

IOL-Blister **zum Körper hin** öffnen.




3

IOL-Halterung entnehmen und Haltegriff zum Körper ausrichten.
Jederzeit waagrecht halten!

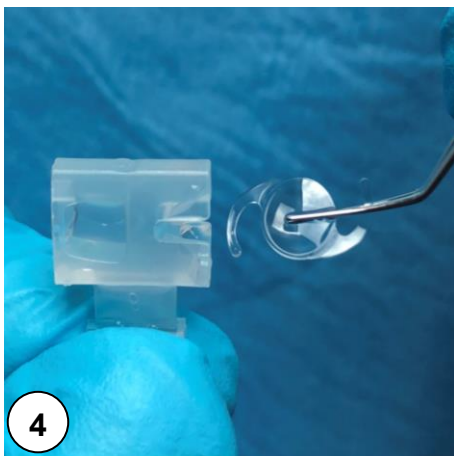


4

Einkerbung muss rechts sein!
IOL behutsam mit Pinzette aus der IOL-Halterung entnehmen
Keine verzahnte Pinzette benutzen!

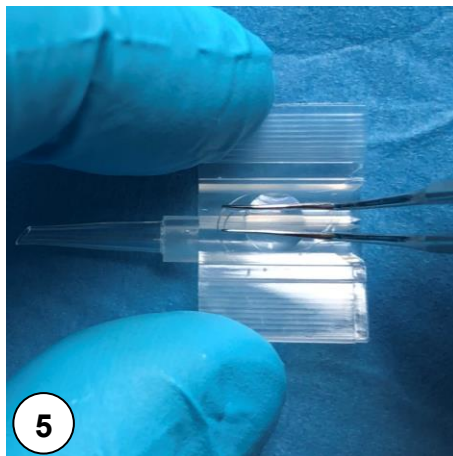



5

IOL in die Kartusche platzieren, dabei **auf korrekte Ausrichtung der Haptik achten**. IOL mit **Pinzette nach unten drücken** und Kartusche schließen bis ein **Klicken** zu hören ist.

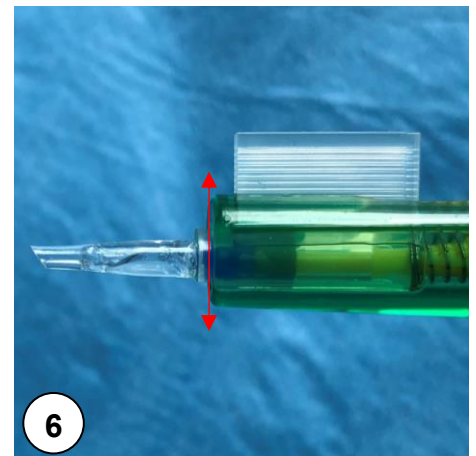

6

Kartusche in den Injektor einsetzen. Blauen Silikonstempel bis zum Anfang des Tips vorschieben, **Kolben kurz entlasten**. Die IOL ist für die Implantation vorbereitet.

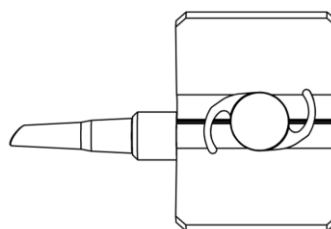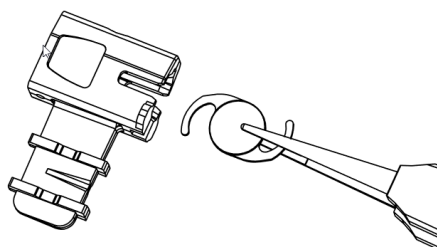

Scan für Video



Teleon Surgical B.V. | Van Rensselaerweg 4 b | 6956AV Spankeren | The Netherlands

www.teleon-surgical.com | iol@teleon-surgical.com

QF2304Av05