

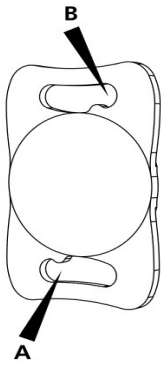


Einlegehinweise - Viscoject Bio


Monofokale LENTIS® mit Plattenhaptik

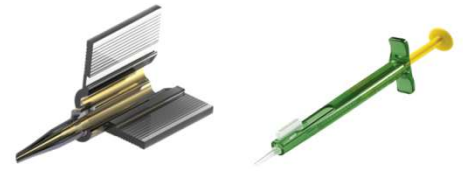

L-303
L-313
LS-313Y
L-323
LU-323
L-333

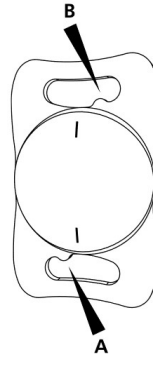

LS-313 T0-6
LU-313 T
LU-313 TY
LU-323 T
LU-323 TY

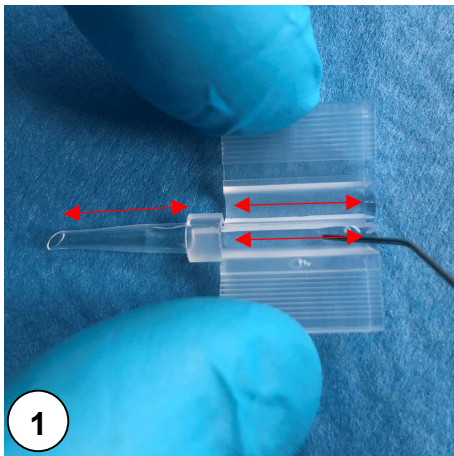


1
Kartuschenspitze und Ladekammer mit Viskoelastikum befüllen.




2
IOL-Blister vom Körper weg öffnen.




3
IOL-Halterung entnehmen und Haltegriff zum Körper ausrichten.
Jederzeit waagrecht halten!

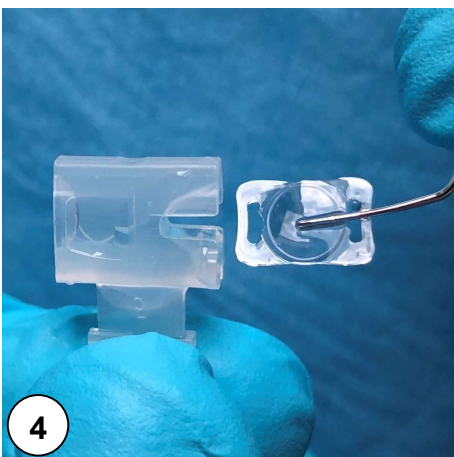

4
!Einkerbung muss rechts sein!
IOL behutsam mit Pinzette aus der IOL-Halterung entnehmen
!Keine verzahnte Pinzette benutzen!

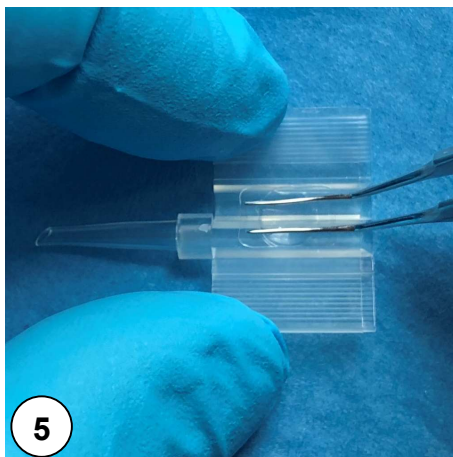

5
IOL in die Kartusche platzieren, dabei auf korrekte Lage der Markierungen A und B achten. IOL mit Pinzette fixieren und Kartusche schließen.

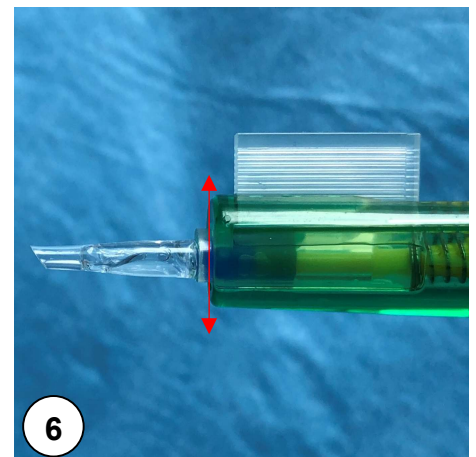

6
Kartusche in den Injektor einsetzen. Blauen Silikonstempel bis zum Anfang des Tips vorschieben, Kolben kurz entlasten und IOL implantieren.

