

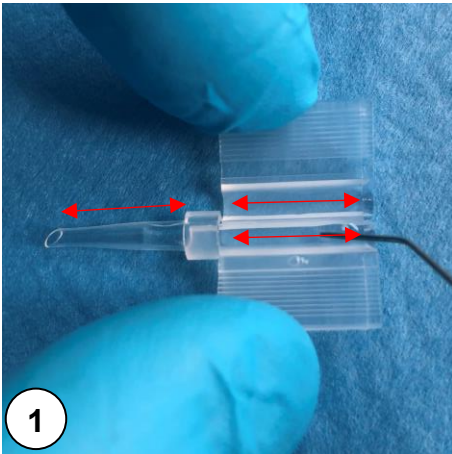
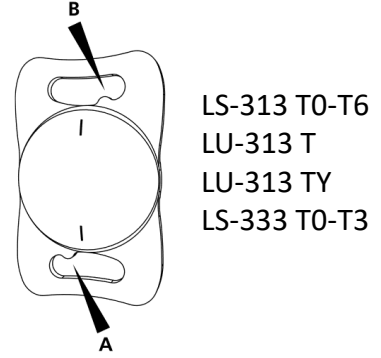
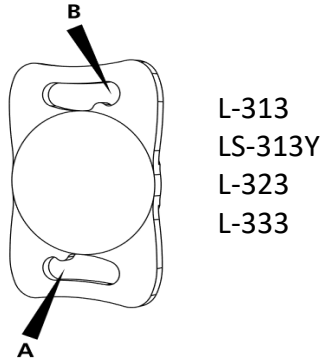
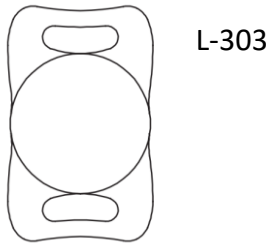


Einlegehinweise - Viscoject Bio

Monofokale LENTIS® mit Plattenhaptik

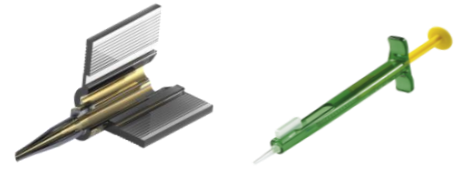


Kartuschenspitze und Ladekammer mit Viskoelastikum befüllen.

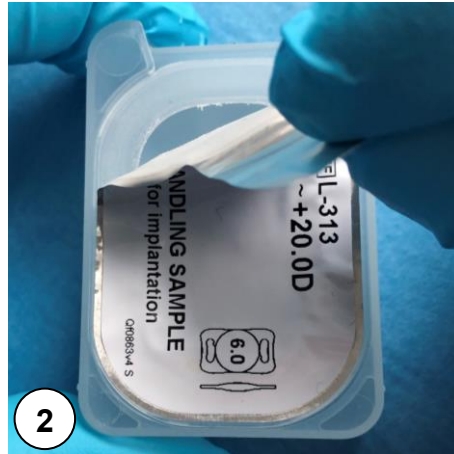


IOL-Blister **zum Körper hin** öffnen.




IOL-Halterung entnehmen und Haltegriff zum Körper ausrichten. **Jederzeit waagrecht halten!**

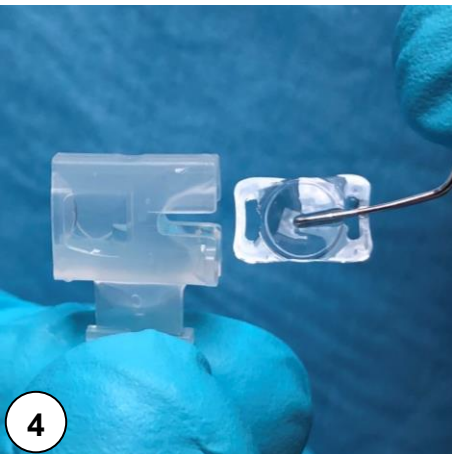



Einkerbung muss rechts sein!
IOL behutsam mit Pinzette aus der IOL-Halterung entnehmen
Keine verzahnte Pinzette benutzen!

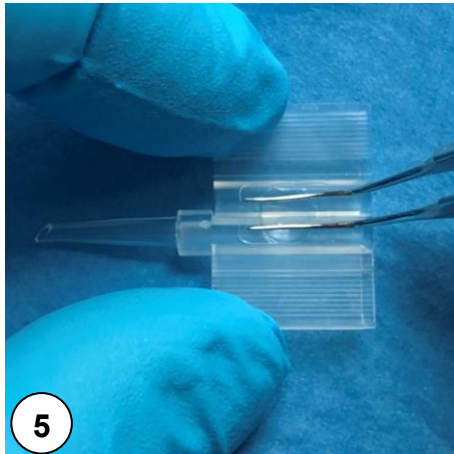

IOL in die Kartusche platzieren, dabei **auf korrekte Lage der Markierungen A und B achten**. IOL mit **Pinzette nach unten drücken** und Kartusche schließen bis ein **Klicken** zu hören ist.

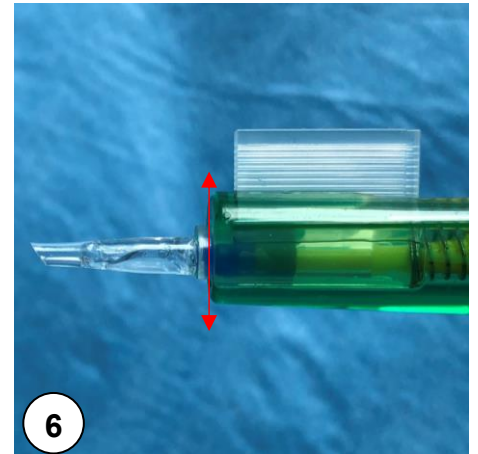

Kartusche in den Injektor einsetzen. Blauen Silikonstempel bis zum Anfang des Tips vorschieben, **Kolben kurz entlasten**. Die IOL ist für die Implantation vorbereitet.

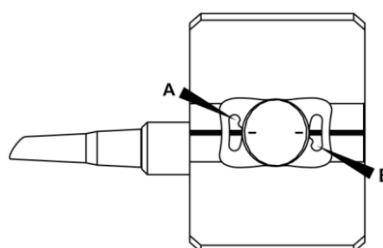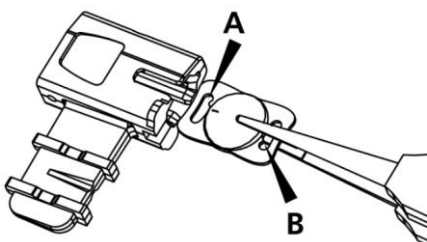

Scan für Video