

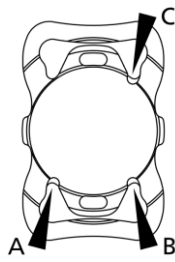


Einlegehinweise - Viscoject Bio


FEMTIS® Familie mit Plattenhaptik

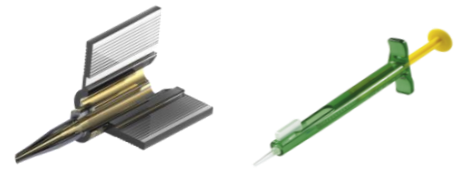


FB-313

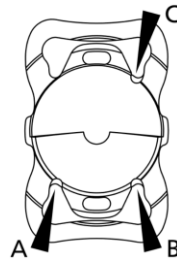

FB-313 MF15
FB-313 MF30

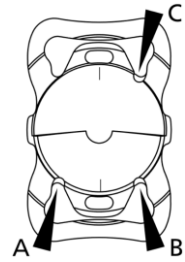

FB-313 MF15 T0-T3
FB-313 MF30 T0-T3

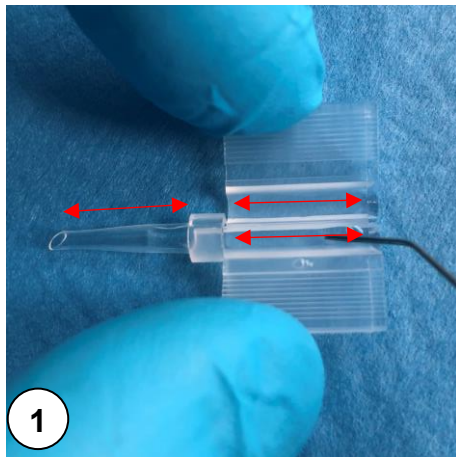

1

Kartuschenspitze und Ladekammer mit Viskoelastikum befüllen.




2

IOL-Blister **zum Körper hin** öffnen.




3

IOL-Halterung entnehmen und Haltegriff zum Körper ausrichten.
Jederzeit waagrecht halten!

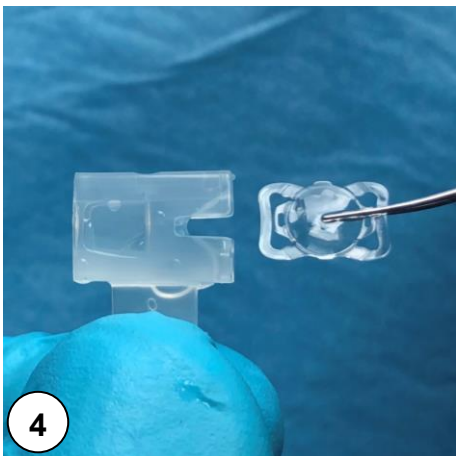


4

Einkerbung muss rechts sein!
IOL behutsam mit Pinzette aus der IOL-Halterung entnehmen
Keine verzahnte Pinzette benutzen!

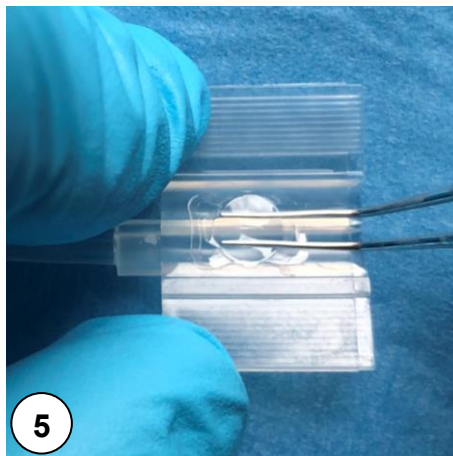



5

IOL in die Kartusche platzieren, dabei **auf korrekte Lage der Markierungen A, B und C achten**. IOL mit Pinzette nach unten drücken und Kartusche schließen bis ein **Klicken** zu hören ist.

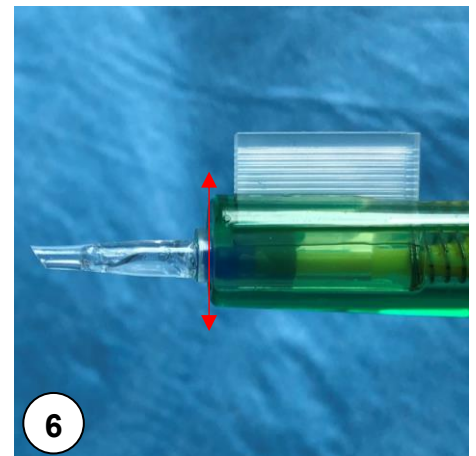

6

Kartusche in den Injektor einsetzen. Blauen Silikonstempel bis zum Anfang des Tips vorschieben, **Kolben kurz entlasten**. Die IOL ist für die Implantation vorbereitet.

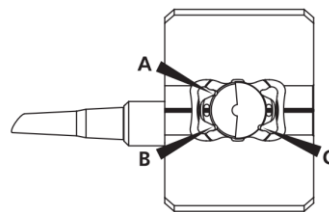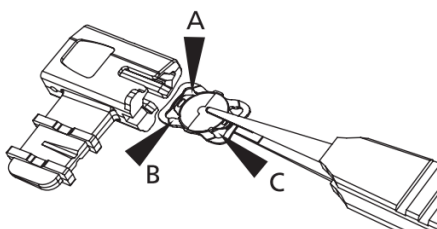

Scan für Video



Teleon Surgical B.V. | Van Rensselaerweg 4 b | 6956AV Spankeren | The Netherlands

www.teleon-surgical.com | iol@teleon-surgical.com

QF2307v06