

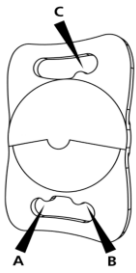


Einlegehinweise - Viscoject Bio


EDOF + MIOL LENTIS® mit Plattenhaptik

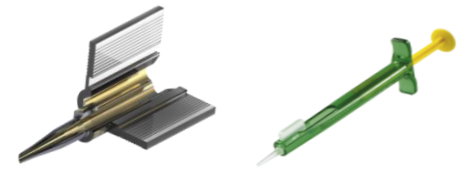

LS-313 MF15
LS-313 MF20

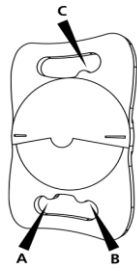


LS-313 MF30

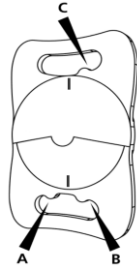

LS-313 MF15 T0-6



LU-313 MF15T/20T/30T
LU-313 MF15TY/20TY/30TY

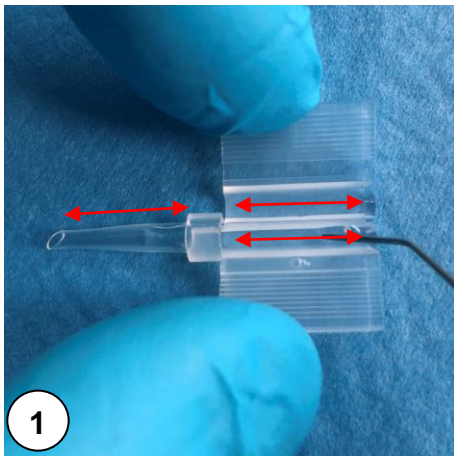

1

Kartuschenspitze und Ladekammer mit Viskoelastikum befüllen.




2

IOL-Blister vom Körper weg öffnen.




3

IOL-Halterung entnehmen und Haltegriff zum Körper ausrichten. **Jederzeit waagrecht halten!**

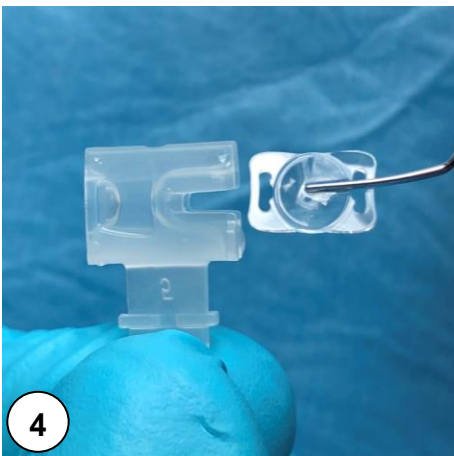


4

!Einkerbung muss rechts sein!
IOL behutsam mit Pinzette aus der IOL-Halterung entnehmen
!Keine verzahnte Pinzette benutzen!

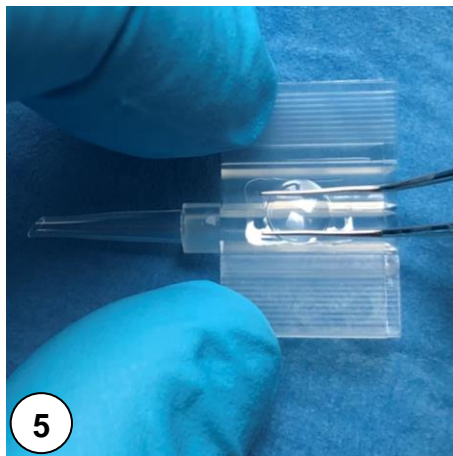

5

IOL in die Kartusche platzieren, dabei auf korrekte Lage der Markierungen A, B und C achten. IOL mit Pinzette fixieren und Kartusche schließen.

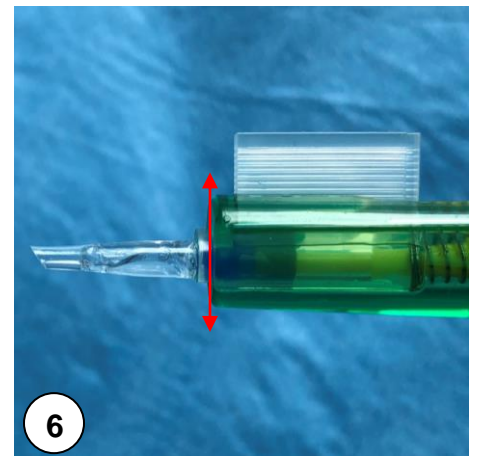

6

Kartusche in den Injektor einsetzen. Blauen Silikonstempel bis zum Anfang des Tips vorschieben, Kolben kurz entlasten und IOL implantieren.

