



Einlegehinweise – Viscoject Bio

EDOF + MIOL LENTIS® mit Plattenhaptik

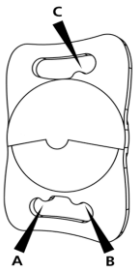

LS-313 MF15
LS-313 MF20

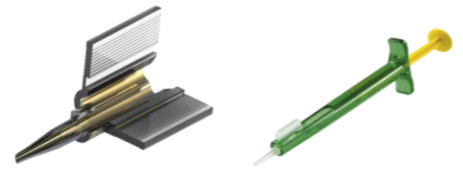


LS-313 MF30
LS-313 MFX30



LS-313 MF15 T0-6
LS-313 MF30 T0-6




LU-313 MF15T/20T/30T/X30T
LU-313 MF15TY/20TY/30TY/X30TY

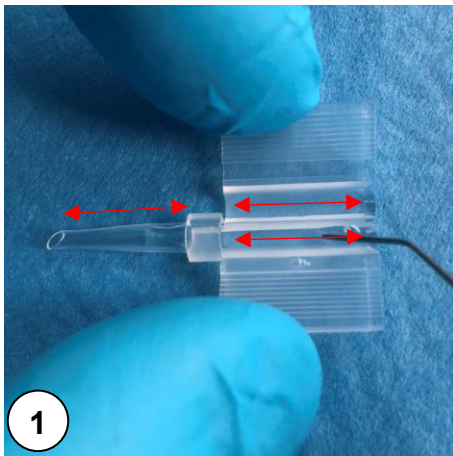

1

Kartuschenspitze und Ladekammer mit Viskoelastikum befüllen.

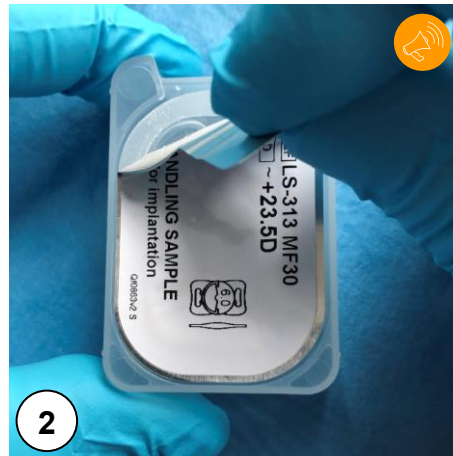

2

IOL-Blister **vom Körper weg** öffnen.




3

IOL-Halterung entnehmen und Haltegriff zum Körper ausrichten. **Jederzeit waagrecht halten!**




4

Einkerbung muss rechts sein!
IOL behutsam mit Pinzette aus der IOL-Halterung entnehmen
Keine verzahnte Pinzette benutzen!

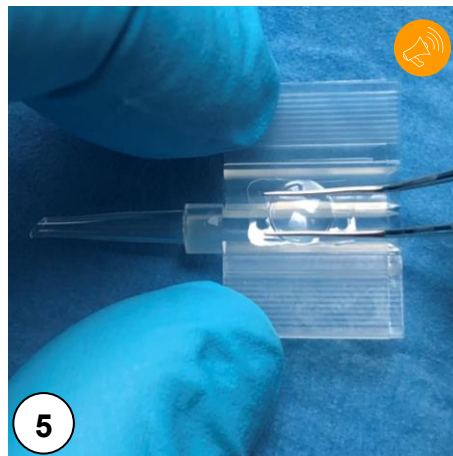



5

IOL in die Kartusche platzieren, dabei **auf korrekte Lage der Markierungen A, B und C achten**. IOL mit **Pinzette nach unten drücken** und Kartusche schließen bis ein **Klicken** zu hören ist.

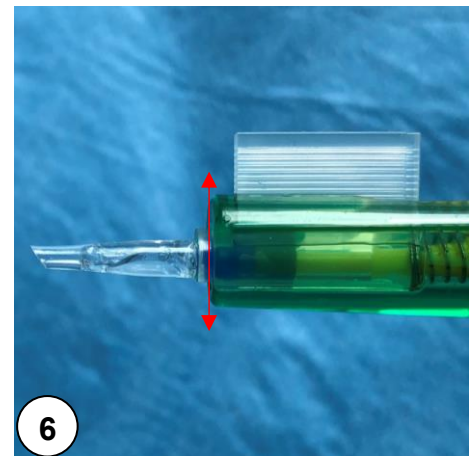

6

Kartusche in den Injektor einsetzen. Blauen Silikonstempel bis zum Anfang des Tips vorschieben, **Kolben kurz entlasten**. Die IOL ist für die Implantation vorbereitet.

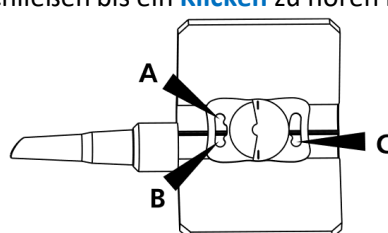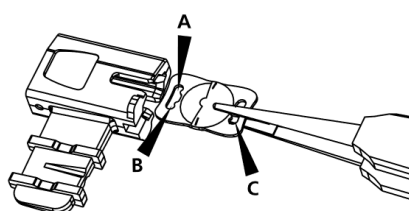

Bitte diese Schritte besonders beachten!