



Einlegehinweise – Viscoject Bio

EDOF + MIOL LENTIS® mit Plattenhaptik

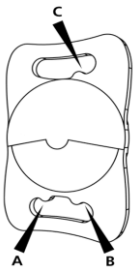

LS-313 MF15
LS-313 MF20

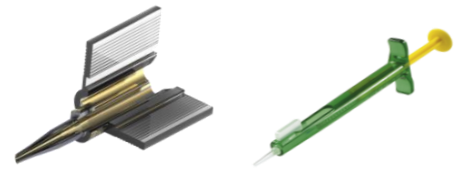


LS-313 MF30
LS-313 MFX30



LS-313 MF15 T0-6
LS-313 MF30 T0-6



LU-313 MF15T/20T/30T/X30T
LU-313 MF15TY/20TY/30TY/X30TY

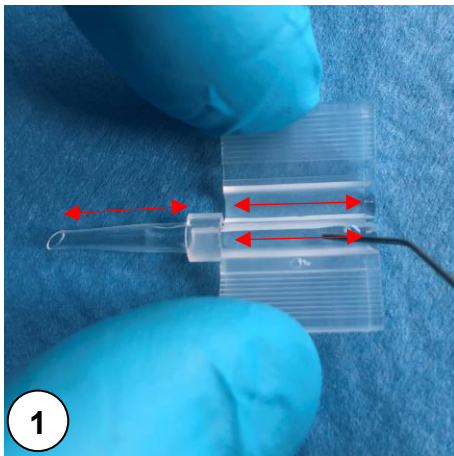


1
Kartuschenspitze und Ladekammer mit Viskoelastikum befüllen.




2
IOL-Blister **zum Körper hin** öffnen.




3
IOL-Halterung entnehmen und Haltegriff zum Körper ausrichten.
Jederzeit waagrecht halten!

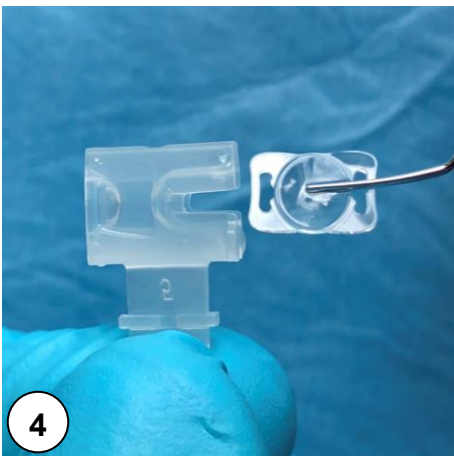



4
Einkerbung muss rechts sein!
IOL behutsam mit Pinzette aus der IOL-Halterung entnehmen
Keine verzahnte Pinzette benutzen!

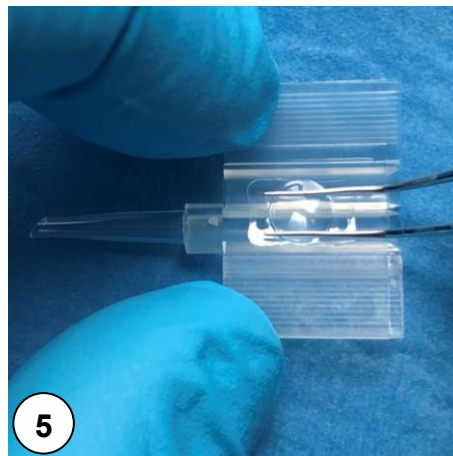

5
IOL in die Kartusche platzieren, dabei **auf korrekte Lage der Markierungen A, B und C achten**. **IOL mit Pinzette nach unten drücken** und Kartusche schließen bis ein **Klicken** zu hören ist.

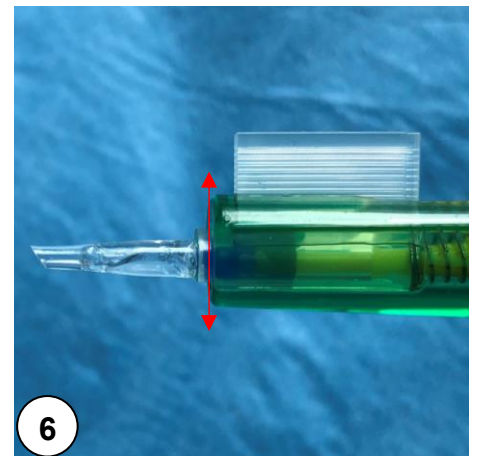

6
Kartusche in den Injektor einsetzen. Blauen Silikonstempel bis zum Anfang des Tips vorschieben, **Kolben kurz entlasten**. Die IOL ist für die Implantation vorbereitet.

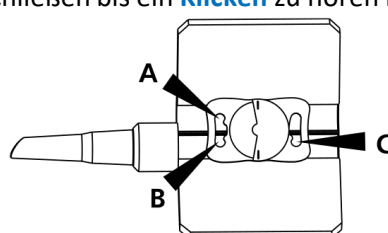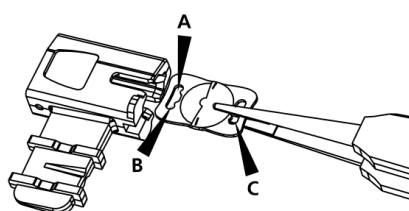

Scan für Video



Teleon Surgical B.V. | Van Rensselaerweg 4 b | 6956AV Spankeren | The Netherlands

www.teleon-surgical.com | iol@teleon-surgical.com

QF2310v04