


Einlegehinweise - Accuject Back-loaded ACUNEX® Familie mit Schlaufen-Haptik

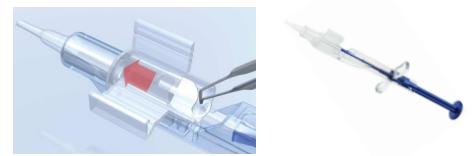


ACUNEX AN6
ACUNEX Quantum AN6Q



ACUNEX Vario AN6V
ACUNEX Variomax AN6VM




ACUNEX Vario toric AN6V T0-T3
ACUNEX Variomax toric AN6VM T0-T3

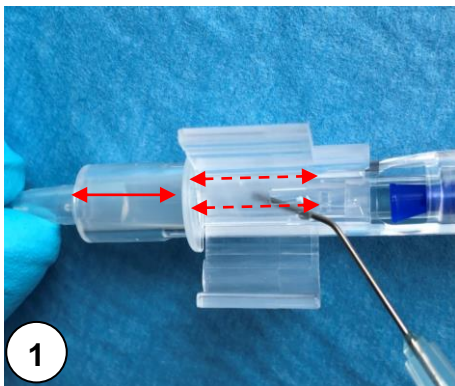


1

Kartuschenspitze und Ladekammer **unterhalb** der Abdeckung mit Viskoelastikum befüllen.

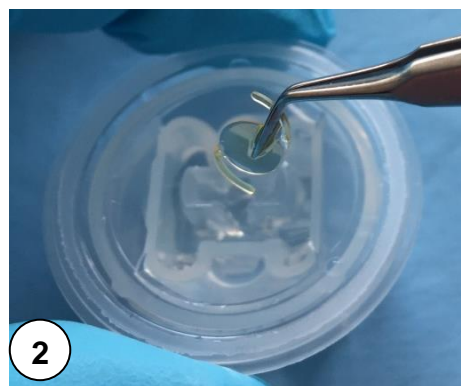


2

IOL behutsam mit einer Pinzette aus der IOL-Halterung nehmen.
Keine verzahnte Pinzette benutzen!

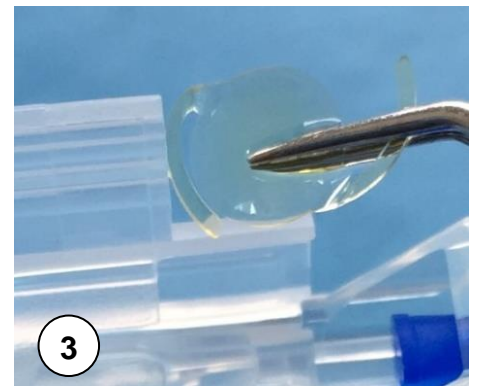


3

Vordere Haptik vorsichtig zur Optik drücken - **gewährleistet anliegende Haptik bei der Implantation!**

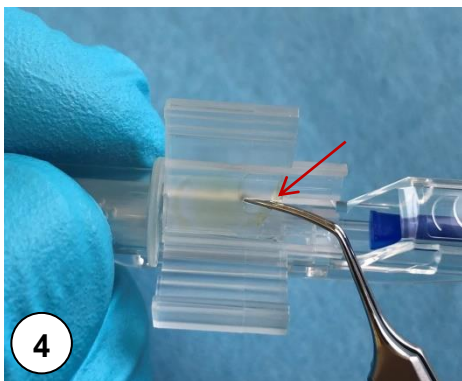


4

IOL unter der Abdeckung platzieren.
IOL mit hinterer Haptik bis zum Ende der Abdeckungsaussparung schieben.

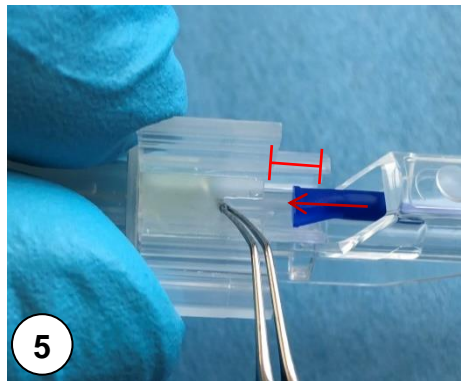

5

Blauen Stempel in den rot markierten Bereich vorschieben, dann Kartusche schließen!

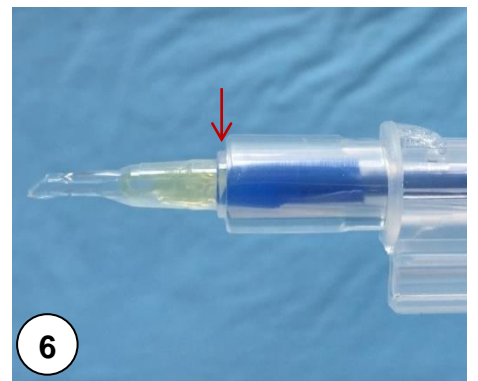

6

Blauen Silikonstempel bis zum Anfang des Tips vorschieben, Kolben kurz entlasten und IOL implantieren.

