


# Einlegehinweise - Accuject Back-loaded ACUNEX® Familie mit Schlaufen-Haptik

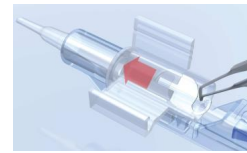


ACUNEX AN6  
ACUNEX Quantum AN6Q




ACUNEX Vario AN6V  
ACUNEX VarioMax AN6VM




ACUNEX Vario Toric AN6V T0-T3  
ACUNEX VarioMax Toric AN6VM T0-T3

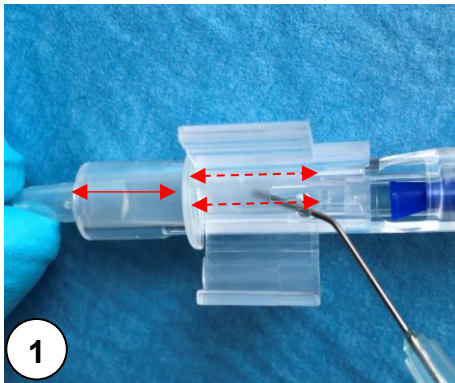


1  
Kartuschenspitze und Ladekammer  
**unterhalb** der Abdeckung mit  
Viskoelastikum befüllen.

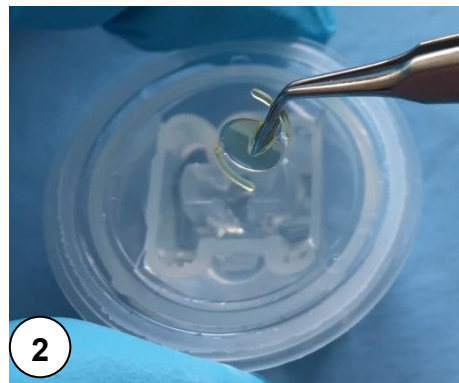


2  
IOL behutsam mit einer Pinzette aus  
der IOL-Halterung nehmen.  
**Keine verzahnte Pinzette benutzen!**

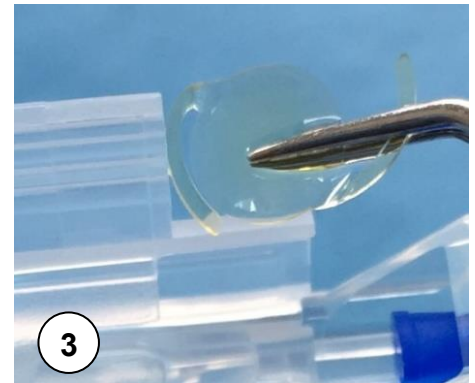


3  
Vordere Haptik vorsichtig zur Optik  
drücken - **gewährleistet anliegende  
Haptik bei der Implantation!**

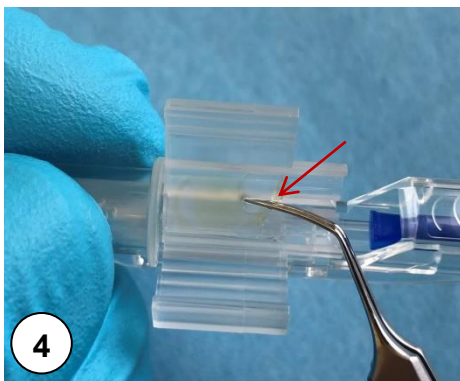



4  
IOL unter der Abdeckung platzieren,  
dabei **auf korrekte Lage der  
Markierung A achten**. IOL mit  
**hinterer Haptik bis zum Ende der  
Abdeckungsaussparung schieben**.

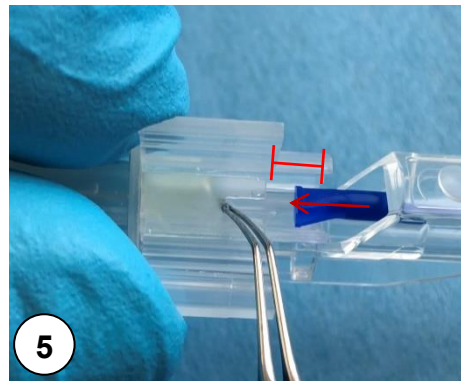

5  
Blauen Stempel in den **rot markierten  
Bereich vorschieben**, dann Kartusche  
schließen!

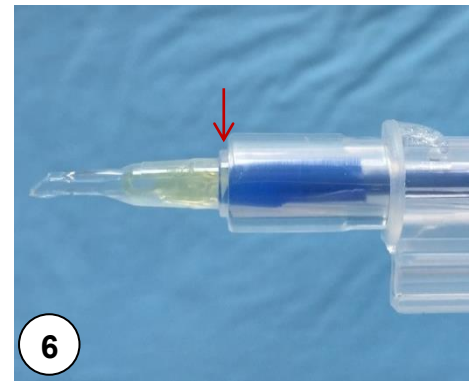

6  
Kartusche in den Injektor einsetzen.  
Blauen Silikonstempel bis zum Anfang  
des Tips vorschieben, **Kolben kurz  
entlasten**. Die IOL ist für die  
Implantation vorbereitet.

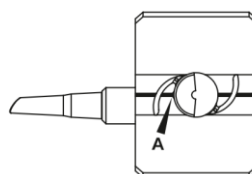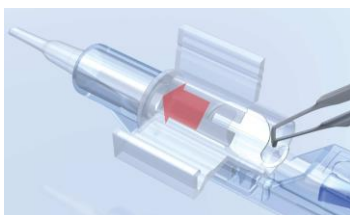

Scan für Video