


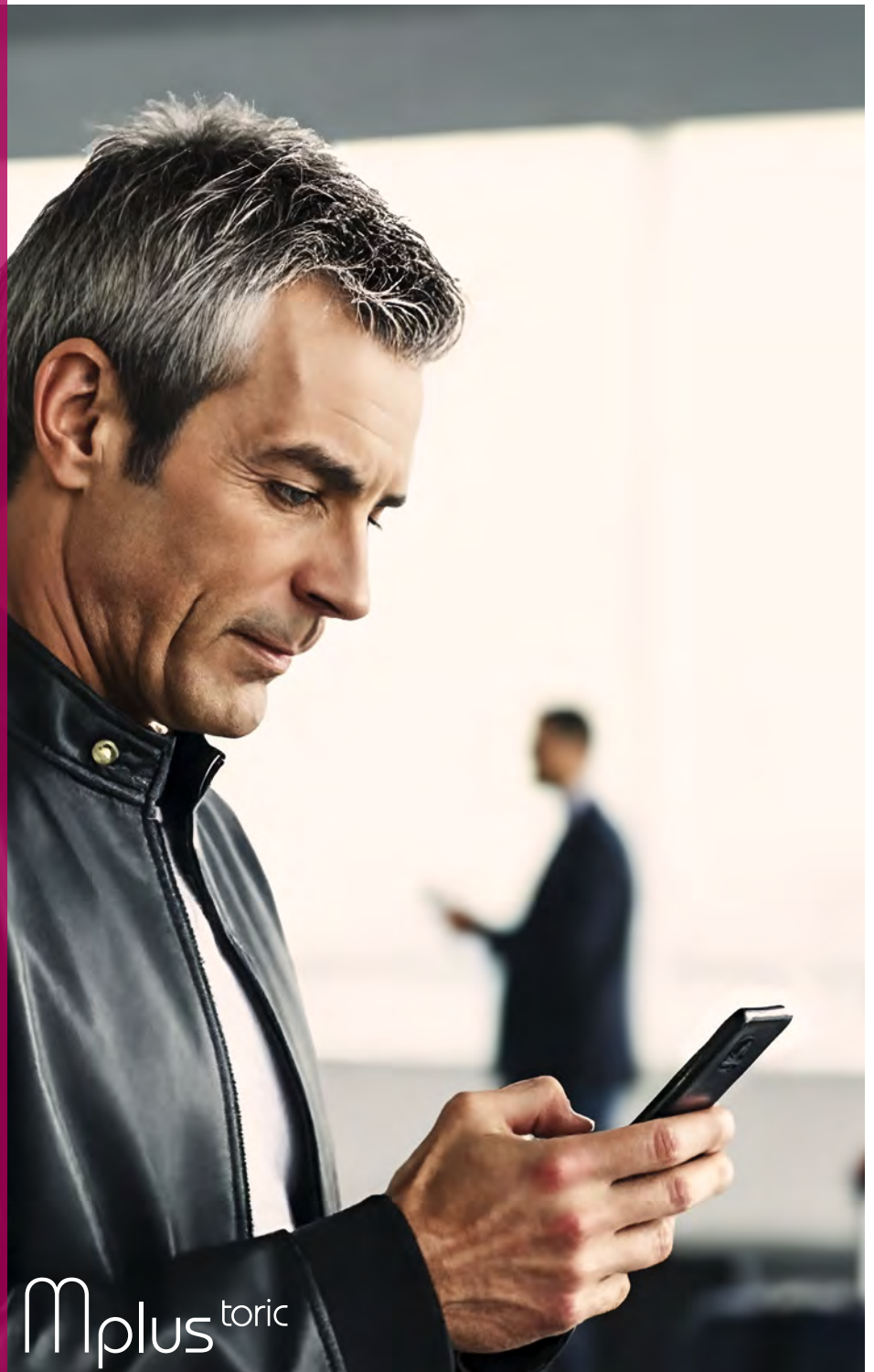

**SEHR HOHE
BRILLEN-
FREIHEIT
FÜR EINE
BEST-
MÖGLICHE
LEBENS-
QUALITÄT**

Premium-
Intraokularlinsen
zur Behandlung des
grauen Stars sowie
Alterssichtigkeit
und Hornhaut-
verkrümmung

LENTIS[®] *mplus* toric



Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

wieder brillenunabhängig den Alltag genießen, diesen nachvollziehbaren Wunsch kann Ihnen die moderne Augenchirurgie erfüllen. Ihr Augenarzt bzw. Ihre Augenärztin bietet neben Standard- auch Premium-Intraokularlinsen – sog. „Linsen mit Zusatznutzen“ – an, welche neben dem Grauen Star auch die Alterssichtigkeit und eine Hornhautverkrümmung korrigieren.

Bitte berücksichtigen Sie, dass in allen Fällen immer die Anweisungen Ihres behandelnden Augenarztes bzw. Augenärztin maßgeblich sind und Sie diesen entsprechend folgen sollten.



**Mit den LENTIS® Mplus^{toric}
Premium-Intraokularlinsen:
Sehr hohe
Brillenunabhängigkeit
für eine bestmögliche
Lebensqualität!**

Was ist eine Alterssichtigkeit?

Für die Akkommodation, d.h. den Wechsel vom Nah- zum Weitsehen, ist die natürliche, menschliche Augenlinse zuständig. Die Alterssichtigkeit beschreibt den langsamen, mit zunehmendem Alter voranschreitenden Verlust der Elastizität der natürlichen Linse. Das Auge wird in seiner Fähigkeit zu akkommodieren immer weiter eingeschränkt.

Diese Elastizität der Linsen wird jedoch vor allem für die Nahsicht gebraucht.


Die Verhärtung der natürlichen Linse führt im Laufe der Jahre zu einem Verlust des Nahsehens. Alltägliche Tätigkeiten, wie das Lesen, die Arbeit am Computer oder die Bedienung des Mobiltelefons werden zunehmend anstrengender für das Auge. Daher kann es erforderlich sein, dass Sie eine Brille oder Kontaktlinsen zum Lesen tragen müssen.

vorher



Anschaubild zur Simulation des erwarteten und möglichen Ergebnis

nachher

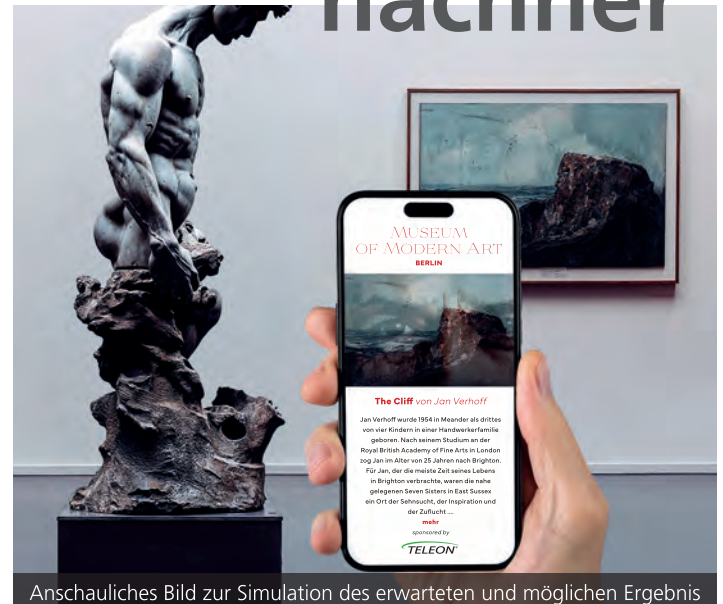

Anschaubild zur Simulation des erwarteten und möglichen Ergebnis


Was ist eine Hornhautverkrümmung?

Bei Patienten, die an einer Hornhautverkrümmung leiden, ist die Hornhaut des Auges nicht gleichmäßig rund. Beim Betrachten von Bildern oder Objekten erleben Patienten mit einer Hornhautverkrümmung eine „Verzerrung“ ihrer Sicht in allen Entfernungen.

Typische Symptome sind:


- Verschwommenes oder verzerrtes Sehen
- Übermüdung der Augen
- Kopfschmerzen nach längerem Lesen oder Bildschirmarbeit

vorher

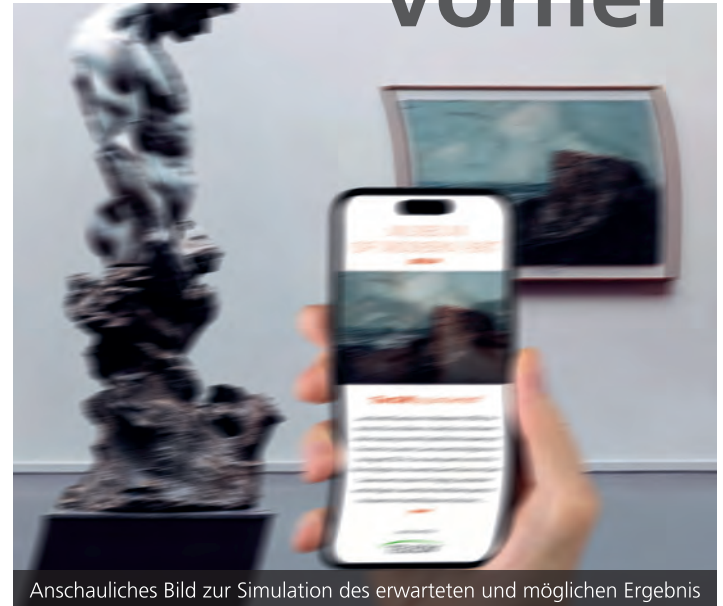

Anschauliches Bild zur Simulation des erwarteten und möglichen Ergebnis

nachher

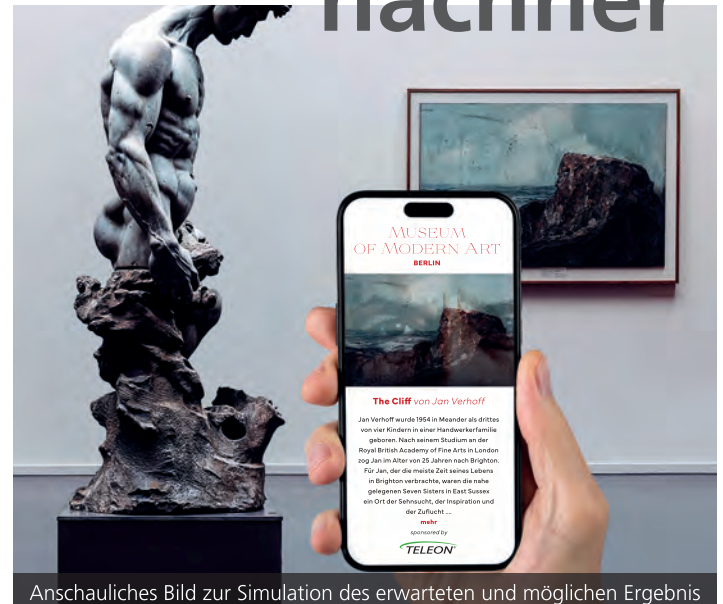

Anschauliches Bild zur Simulation des erwarteten und möglichen Ergebnis

Brille und Kontaktlinse, die besten Lösungen?

Die herkömmliche Behandlung der Alterssichtigkeit und Hornhautverkrümmung besteht im Tragen von Brillen und/oder Kontaktlinsen. Ein dauerhafter Brillen- oder Kontaktlinseneinsatz geht jedoch zumeist mit einer Minderung der Lebensqualität einher, da es eine tägliche Auseinandersetzung mit der Sehbeeinträchtigung und zwangsläufig eine Einschränkung im Alltag bedeutet.

Moderne Linsen Chirurgie

Mittels moderner Augenchirurgie kann eine Korrektur der Alterssichtigkeit und gleichzeitig der Hornhautverkrümmung durch einen einzigen Routineeingriff erreicht werden, indem die natürliche Augenlinse durch ein modernes Linsenimplantat ersetzt wird. Durch die Implantation einer multifokalen torischen Intraokularlinse kann eine Korrektur der Alterssichtigkeit und Hornhautverkrümmung erreicht werden und ermöglicht dem Patienten eine hohe Brillenunabhängigkeit* für die Fern-, Zwischen- und Nahsicht. Gleichzeitig erfolgt durch das besondere Optikdesign eine effektive und stabile Korrektur der Hornhautverkrümmung.

Das Ergebnis:

Sehr hohe Brillenfreiheit* für eine bestmögliche Lebensqualität!

*Klinische Studien haben eine sehr hohe Brillenunabhängigkeit bestätigt.

Das Plus für Sie.

LENTIS® Mplus^{toric}

Die Vorteile:

- Sehr hohe Brillenfreiheit für eine bestmögliche Lebensqualität!
- Optimale Korrektur der Hornhautverkrümmung durch individuelle Linsenherstellung.
- Diese multifokale torische Intraokularlinse ermöglicht ein sehr gutes Sehen im Fern-, Zwischen- und Nahbereich.
- Tätigkeiten des Alltags, wie z. B. Lesen, Bedienung des Mobiltelefons, Einkaufen, Arbeiten am Computer sowie aktive Freizeitgestaltungen, wie Fahrradfahren, Autofahren und andere Fitness- und Sportarten, sind mit dieser multifokalen Intraokularlinse nahezu brillenunabhängig möglich.

- Klinische Studien attestieren dieser multifokal torischen Intraokularlinse eine hohe Patientenzufriedenheit!

Zusatznutzen: **Violettlichtfilter**

Dieser spezielle Filter verändert die Transmission des sichtbaren Lichts, indem er einen Teil des hochenergetischen Lichts blockiert. Dieser Teil des Lichts steht unter Verdacht, Netzhautzellen zu schädigen.

KONTAKT

Weitere Informationen:

www.teleon-patientinfo.com



HERSTELLER:

TELEON®

Teleon Surgical B.V.

Van Rensselaerweg 4 b | NL - 6956AV Spankeren

✉ marketing@teleon-surgical.com  www.teleon-surgical.com

QF2337v3